

Zoom! 1 uur whitening



# ZOOM!

Professioneel Whitening Systeem

UW  
witste glimlach...  
na slechts  
één bezoek  
aan de praktijk

# ZOOM!

Professioneel Whitening Systeem

## Wilt u Zoomen?

Het Zoom! whitening-systeem voor aan de stoel is een wetenschappelijk geavanceerde whitening-procedure voor de tanden. Het is veilig, effectief en snel, zeer snel. Na slechts één bezoek aan de praktijk kunnen uw tanden aanzienlijk witter worden. Zoom! aan de stoel is ideaal voor iedereen die onmiddellijke resultaten wil zien. Het is de perfecte keuze voor personen met een druk schema.

## Klaar om te Zoomen!

Het Zoom! whitening-systeem kan uw tanden aanzienlijk witter maken in een behandeling van slechts 45 minuten. De procedure is eenvoudig. Het begint met een korte voorbereiding waarbij uw lippen en tandvlees worden afgedekt en alleen uw tanden zichtbaar zijn. Vervolgens wordt de gepatenteerde Zoom! whitening-gel aangebracht, die speciaal is ontworpen om gebruikt te worden met onze Zoom! lamp. De Zoom! lamp en gel versterken elkaar in het afbreken van de vlekken en verkleuringen op en in uw tanden. Met een goede mondhygiëne en whiteningonderhoud kunnen uw tanden jarenlang blijven stralen.

## Kies ook voor Zoom!

Wilt u zich goed voelen, er goed uit zien en indruk maken met een stralende lach? Zet dan nu de eerste stap. U bent het waard.

## Veel gestelde vragen

V. Wat is Zoom! whitening?

A. Zoom! is een whitening proces waarmee verkleuringen van tandglazuur en tandbeen lichter worden.

V. Wat is de oorzaak van tandverkleuring?

A. Er zijn vele oorzaken. Vaak heeft verkleuring van de tanden te maken met leeftijd en de consumptie van verkleurende middelen (koffie, thee, cola, tabak, rode wijn, enz.). Ook inname van bepaalde antibiotica of overdadige hoeveelheden fluoride tijdens de tandvorming kan verkleuringen veroorzaken.

V. Voor wie is whitening van tanden geschikt?

A. Vrijwel iedereen. De behandeling is voor de een echter effectiever dan voor de ander. Uw tandarts kan met een grondig vooronderzoek bepalen of u geschikt bent voor deze behandeling. Hierbij wordt onder andere naar de huidige tint van uw tanden gekeken.

V. Wordt whitening van tanden veel toegepast?

A. Meer dan u denkt. Iedereen heeft baat bij een stralende lach. Met Zoom! krijgt u zo'n lach eenvoudiger en sneller dan ooit.

V. Is whitening van tanden veilig?

A. Ja! Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uit de onderzoeksgegevens en uit klinische studies blijkt dat whitening van tanden onder toezicht van een tandarts veilig is. Het gebruik van Zoom! (en alle andere producten voor whitening van tanden) wordt alleen kinderen onder de 16, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven afgeraden.

V. Hoe lang blijft het resultaat zichtbaar?

A. Als u na de whitening van uw tanden enkele eenvoudige instructies voor de verzorging van uw tanden opvolgt, zullen uw tanden altijd lichter blijven dan ze waren. Voor een optimaal resultaat raden we u aan te flossen, tweemaal per dag uw tanden te poetsen en nu en dan onderhoud te plegen met Nitewhite ACP- thuisbleekgel. Deze producten zijn gebaseerd op een professionele formule en zijn specifiek bedoeld om uw tanden zo stralend mogelijk te houden. Ze zijn uitsluitend verkrijgbaar via uw tandarts of mondhygiënist.

V: Hoe werkt het Zoom/Whitening systeem?

A: Het actieve bestanddeel in de whitening-gel dat door de Zoom lamp geactiveerd wordt, is waterstofperoxide. Bij de afbraak van deze stof komt zuurstof vrij, dat in het tandglazuur en tandbeen dringt en de moleculen die zorgen voor de verkleuring afbreekt, zonder de structuur van de tanden aan te tasten. De Zoom lamp bespoedigt de activering van de waterstofperoxide en helpt bij de binnendringen in het tandoppervlak. Nieuwe klinische onderzoeken hebben aangetoond dat het Zoom<sup>TM</sup> Advanced Power<sup>TM</sup> whitening-systeem onmiddellijk na de procedure tot 55% betere resultaten leidt dan gel alleen en na 30 dagen 44% betere resultaten geeft.<sup>1</sup>

V: Wat voelt een patiënt tijdens de Zoom/behandeling?

A: De patiënt kan tijdens de procedure op zijn gemak televisie kijken of naar muziek luisteren. Voor angstige personen of mensen met een sterke kokhalzneiging kan het moeilijk zijn de hele procedure te ondergaan; zij dienen vóór de procedure hun behandelbaar te raadplegen.



V: Hoe wordt de blootstelling aan de Zoom! licht gereguleerd?

A: Voor de Zoom! procedure moeten al het zachte weefsel in en rond de mond worden beschermd. De tandheelkundige moet erop toezien dat alle blootgestelde huid en weefsel gevuld en beschermd is. Tijdens de procedure moet een speciale beschermingsbril gedragen worden.

Patiënten die lichtgevoelige medicijnen of middelen nemen, al dan niet op recept verkrijgbaar of homeopathische middelen, en lichtgevoelige personen, inclusief mensen die PUVA therapie (psoralen+UV-bestraling) of een andere fotochemotherapie ondergaan, of patiënten met melanoma dienen vóór de procedure hun huisarts of specialist te raadplegen. Mensen die om deze redenen niet in aanmerking komen voor Zoom!whitening aan de stoel, kunnen een uitstekende kandidaat zijn voor thuisbleken met NiteWhite of DayWhite.

V: Hoe lang duurt de Zoom! behandeling?

A: De behandeling duurt in totaal nog geen uur. Na een korte voorbereiding worden de tanden in slechts 45 minuten lichter gemaakt. (Het wordt aanbevolen de tanden goed te laten reinigen voordat u aan de Zoom! behandeling begint.)

V: Zijn er bijwerkingen?

A: Bij sommige patiënten treedt tijdens en na de behandeling gevoeligheid op. De Zoom! lamp genereert een minimale hoeveelheid warmte, die doorgaans de oorzaak is van het ongemak. Soms voelt de patiënt onmiddellijk na de procedure een licht tintelend gevoel, maar dit verdwijnt altijd vanzelf. Uw tandarts kan eventueel producten aanbevelen voor de gevoeligheid die na de behandeling optreedt, zoals bijvoorbeeld de Relief gel die ook direct na de Zoom! behandeling gebruikt wordt.



100



101

## Bekend van Extreme Makeover en Make Me Beautiful



### *Ter geruststelling*

Whitening van tanden is een cosmetische behandeling die veel wordt toegepast door tandartsen. Waterstofperoxide, het actieve middel in Zoom!, wordt al jaren veilig toegepast bij de behandeling van tandvlees en ander zacht weefsel in de mond.

Het whitening proces werkt op de meeste verkleurde tanden. Donkere verkleuringen, bijvoorbeeld veroorzaakt door antibiotica, zijn moeilijker af te breken. Het uiteindelijke resultaat verschilt van patiënt tot patiënt en is afhankelijk van de structuur van de tanden.

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan aan uw tandarts of mondhygiënist. Kies Zoom! voor een stralende lach.

**ZOOM!**  
Professional Whitening System